




Gebrauchsanweisung für InstantVap 12V Oxalsäureverdampfer

Tragen Sie immer die richtige Schutzausrüstung:

- Dicke Handschuhe
- Atemschutzmaske (Vollmaske mit kombinierten Filtereinsatz)
- Schutzbrille, falls die Maske nicht vollflächig ist
- Lange Ärmel
- Nur für den Außeneinsatz!

Das Gerät speichert die Wärme noch lange nach dem Gebrauch!

Stellen Sie das Gerät nicht auf brennbare Materialien wie Gras oder Stroh. Nur im abgekühlten Zustand transportieren.

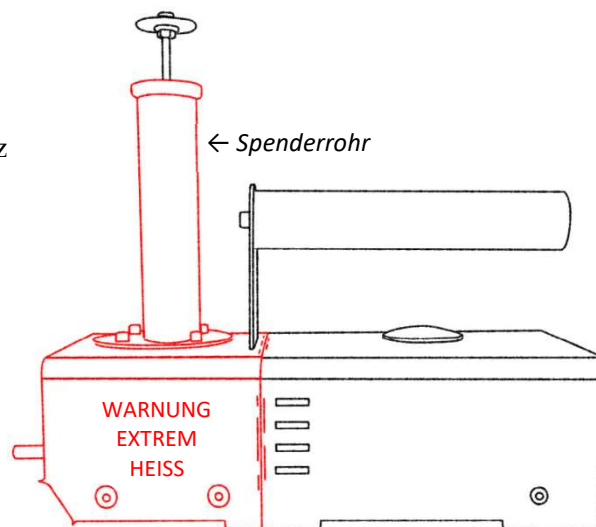

Wie man den InstantVap 12V benutzt

1. Schließen Sie Ihren Akku an

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter zum Starten ausgeschaltet ist.
- Rot = positiv, Schwarz = negativ.
- WICHTIG: Eine falsche Polung führt zu Schäden am Gerät und ist nicht durch die Garantie abgedeckt!
- Das Gerät sollte die aktuelle Temperatur anzeigen, aber nicht aufheizen
- VERWENDEN SIE DEEP-ZYKLUS BATTERIE.

2. Lassen Sie ihn anlaufen und nach 3-5 Sekunden können Sie den Schalter umlegen, um die Heizung einzuschalten

3. Prüfen Sie vor der Behandlung Ihre Spannung


- Die Überwachung der Batteriespannung ist wichtig, um die Lebensdauer Ihrer Batterie zu verlängern. Betreiben Sie einen Akku niemals unterhalb der vom Hersteller empfohlenen Unterspannungsgrenze. Überprüfen Sie die Batteriespannung auf der Spannungsanzeige oben auf dem Gerät, während die Heizung ausgeschaltet ist.

4. Mit der Behandlung warten

- Lassen Sie das Gerät vor der ersten Behandlung die eingestellte Temperatur (SV) erreichen. Die empfohlene Solltemperatur beträgt 230°C (voreingestellt).
- Drücken Sie den Dispenser in die Oxalsäure, um die Dosis zu sammeln, legen Sie sie dann in den Verdampfer und drücken Sie den Dispenser.
- Warten Sie, bis sich die aktuelle Temperatur (PV) um einige Grad der eingestellten Temperatur annähert, und Sie können mit dem nächsten Bienenstock fortfahren.

4. Beendigung der Behandlung

- Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen. Entfernen Sie die Batterieklemmen, lassen Sie sie nach dem Gebrauch niemals am Gerät. Lassen Sie die Akkus nicht lange entladen herumliegen, sondern laden Sie sie noch am selben Tag auf. Reinigen Sie den Verdampfer wie unter "Wartung" beschrieben.

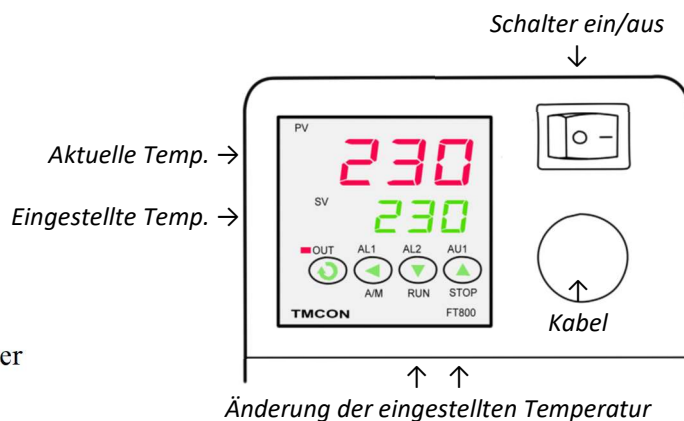


Wie man die Dosierung des Spenders einstellt

1. Nehmen Sie den Dispenser vom Verdampfer ab.
Hinweis: Der Dispenser wird heiß, seien Sie vorsichtig!

2. Indikator auf dem Rohr ausfindig machen

- Der Indikator ist ein Loch, das wie das Bild rechts aussieht.

1 = 1 Gramm Oxalsäure-Dehydrat

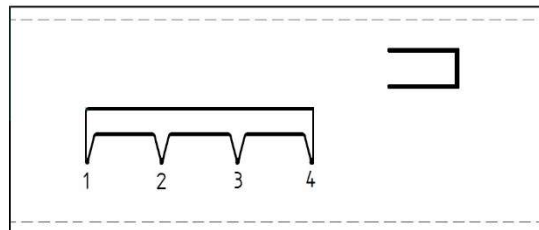

2. Dosierung durch Drehen des Griffs einstellen

- Nicht über den Indikator hinaus verdrehen. Kann von 1-4g eingestellt werden.

Wartung

Reinigen Sie das Gerät nach einem Tag der Behandlung.

1. Lassen Sie das Gerät auf ~80°C abkühlen. Wenn die Batterie angeschlossen und der Schalter ausgeschaltet ist, können Sie die aktuelle Temperatur des Geräts überwachen.

- Ein heißes Gerät kann Dampf erzeugen, der zu Verbrennungen führt. Seien Sie immer vorsichtig!
- Falls Sie die spezielle Silikonkappe zur Reinigung verwenden, beachten Sie bitte die mitgelieferte Anleitung.

2. Nach dem Abkühlen spülen Sie die Schale über den Schlauch mit Wasser aus.

- Verwenden Sie NICHT zu viel Wasser und bringen Sie das Wasser nicht auf den Rest des Geräts, niemals auf das Rohr, in das der Spender passt! Wasserschäden jeglicher Art fallen nicht unter die Garantie.

3. Nach dem Entleeren der Schüssel wird empfohlen, das Gerät zu erwärmen, um eventuelles stehendes Wasser zu entfernen.

4. Spülen/Schrubben Sie den Spender in einem Eimer mit Wasser, um Rückstände zu entfernen.

- Geben Sie einen Tropfen Mineralöl / Fett auf den O-Ring, um die Lebensdauer und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

Es wird empfohlen, von Zeit zu Zeit eine kleine Menge Wasser (~20 ml) durch den Spenderschlauch in das abgekühlte Gerät zu geben, dann den Spender wieder einzusetzen und das Gerät zu erhitzen, so dass das Wasser darin kocht. Dadurch wird die Schale gründlicher gereinigt. Die Temperatur wird nicht über ~110 °C ansteigen, bis das gesamte Wasser aus der Schale verdampft ist.

Garantie

Wir bieten eine 2-jährige Garantie für unser Gerät. Im Falle eines Defekts kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Kontaktdaten.

Weitere Informationen und Tipps über InstantVap und die Verdampfung von Oxalsäure finden

Sie unter:

www.instantvap.eu

Kontakt

Name der Kontaktperson: János Fenyősy

Telefon: +36 30 357 3509 (Nur Englisch)

Email: info@instantvap.hu (alle Sprachen)

Firma: InstantVap Tech Kft. (CRN: 01-09-411646, Tax nr.: HU27783210)